

# ピップマグネループ取扱説明書

## 注意事項

- ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。※裏面の文書も必ずお読みください。
- お読みになったあとは保存し、わからないときに再読してください。

## ご使用前に

ご使用のたびに、マグネループに金属片(針やピンなど)が付着していないか確認する。(鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをするおそれがあります。)


## お願い

1. クリーム、スプレー、シップなどの薬剤と併用しないでください。(薬剤がマグネループにつくと、劣化の原因になります。)
2. 次のような使用はしないでください。(劣化や変色の原因になります。)  
①入浴剤を入れた風呂への入浴 ②温泉浴 ③海水浴
3. 強く引っ張らないでください。(切れる原因になります。)
4. 使用目的以外の用途に使用しないでください。
5. こりの症状が改善したら、とりはずしてください。


## ご使用方法

下図に従ってコネクターを取りはずし、直接肌に触れるように首に装着します。首からはずす時も同じ要領でコネクターをはずしてください。

コネクターを指でしっかりつかみ  
水平に引っ張ってはずす。

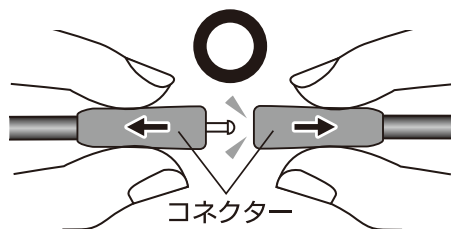

コネクター以外のところを  
つかんで引っ張らないでください。

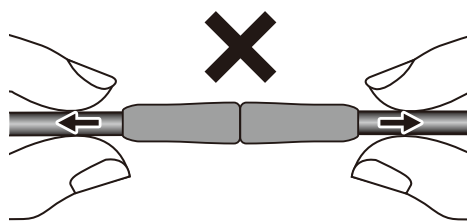

## お手入れ方法

汗や皮脂による黄変や臭気を防ぐために、まめに汚れを水、またはぬるま湯で洗い流してください。(石けん・洗剤のご使用はご遠慮ください。劣化の原因となります。)

## ⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。  
※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

1. 首筋に湿疹や傷がある場合は使用しない。(症状が悪化するおそれがあります。)
2. 使用中皮膚や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。
3. ループに伸びや膨らみなどの異変を感じたら、使用を中止する。
4. サウナなど、高温になる場所で使用しない。
5. 火気のそばに置かない。(変形の原因になります。また引火すると有毒ガスが発生するおそれがあります。)

※ご使用に際し、ご不明な点がございましたら、当社お客様相談室にご相談ください。

お問い合わせ

**P!** **ピップ株式会社**  
大阪市中央区農人橋2-1-36  
〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427

土・日・祝日を除く10:00~17:00