

ピップマグネループEX取扱説明書

注意事項

- ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。※裏面の文書も必ずお読みください。
- お読みになったあとは保存し、わからないときに再読してください。

ご使用前に

ご使用のたびに、ピップマグネループEXに金属片(針やピンなど)が付着していないか確認する。(鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをするおそれがあります。)


お願い

1. 次のような使用はしないでください。(劣化や変色の原因になります。)
 - ① クリーム、スプレー、シップなどの薬剤と併用
 - ② 入浴剤を入れた風呂への入浴 ③ 温泉浴 ④ 海水浴
2. 強く引っ張らないでください。(切れる原因になります。)
3. 使用目的以外の用途に使用しないでください。
4. こりの症状が改善したら、とりはずしてください。

ご使用方法



コネクターとアクセサリ部分を確認してください。
下図に従ってコネクターを取りはずし、直接肌に触れるように首に装着します。
首からはずす時も同じ要領でコネクターをはずしてください。

コネクターを指で
しっかりつかみ水平に
引っ張ってはずす。

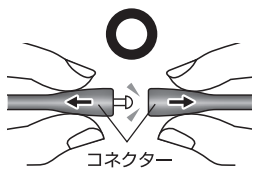


コネクター

コネクター以外の
ところをつかんで
引っ張らないでください。

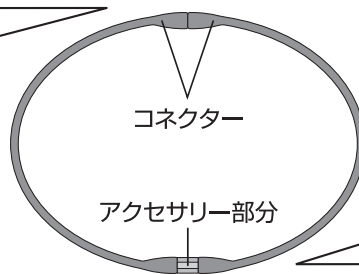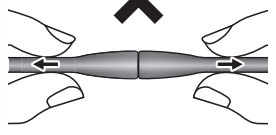

×ご注意

アクセサリ部分
(色のついている部分)を
無理にはずさないでください。

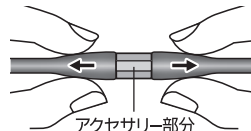

アクセサリ部分

お手入れ方法

まめに水、またはぬるま湯で洗い流してください。
石けんや洗剤での洗浄は劣化の原因となります。また、お手入れをしないままでの
ご使用は、汗や皮脂による黄変や臭気の原因となります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

1. 首筋に湿疹や傷がある場合は使用しない。(症状が悪化するおそれがあります。)
2. 使用中皮膚や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。
3. ループに伸びや膨らみなどの異変を感じたら、使用を中止する。
4. サウナなど、高温になる場所で使用しない。
5. 火気のそばに置かない。(変形の原因になります。また引火すると有毒ガスが発生するおそれがあります。)

※ご使用に際し、ご不明な点がございましたら、当社お客様相談室にご相談ください。

お問い合わせ



ピップ株式会社

大阪市中央区農人橋2-1-36
〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427

土・日・祝日を除く10:00~17:00

<ピップマグネループ> ホームページ www.magneloop.com