

ピップマグネネック取扱説明書

注意事項

- ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。※裏面の文書も必ずお読みください。
- お読みになったあとは保存し、わからないときに再読してください。

ご使用前に

ご使用のたびに、ピップマグネネックに金属片(針やピンなど)が付着していないか確認する。(鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをするおそれがあります。)

お願い


1. 次のような使用はしないでください。(劣化や変色の原因になります。)
 - ① クリーム、スプレー、シップなどの薬剤と併用
 - ② 入浴剤を入れた風呂への入浴
 - ③ 温泉浴
 - ④ 海水浴
2. 一度に強く曲げないでください。(折れる原因になります。)
3. 車など高温になる場所や、真冬の屋外など極端に低温になる場所での保管はしないでください。(変形の原因になります。)
4. 使用目的以外の用途に使用しないでください。
5. こりの症状が改善したら、とりはずしてください。
6. 就寝中は使用しないでください。

ご使用方法

1. 下図に従って、直接肌に触れるように首に装着します。




首まわりの適応サイズは
28cm~41cmまでです。

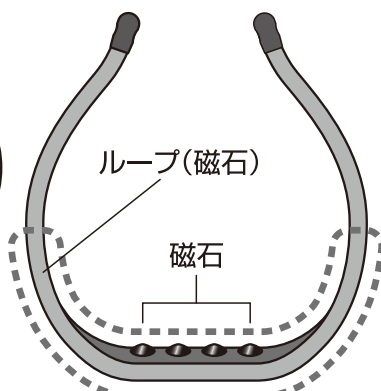

点線部分は折り曲げないでください。
破損の原因になります。

2. きついゆるいなど感じたら図の部分
を少しずつ曲げて調節してください。

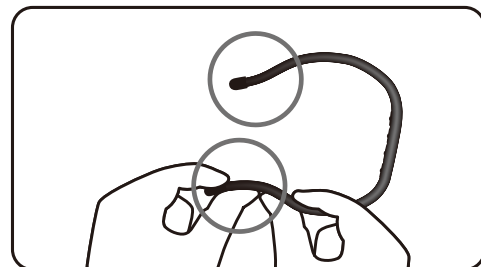

※就寝中は使用しないでください。

お手入れ方法

まめに水、またはぬるま湯で洗い流してください。
石けんや洗剤での洗浄は劣化の原因となります。また、お手入れをしないままでの
ご使用は、汗や皮脂による黄変や臭気の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

1. 首筋に湿疹や傷がある場合は使用しない。(症状が悪化するおそれがあります。)
2. 使用中皮膚や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。
3. 製品に伸びや膨らみなどの異変を感じたら、使用を中止する。
4. サウナなど、高温になる場所で使用しない。
5. 火気のそばに置かない。(変形の原因になります。また引火すると有毒ガスが発生するおそれがあります。)

※ご使用に際し、ご不明な点がございましたら、当社お客様相談室にご相談ください。

お問い合わせ



ピップ株式会社

大阪市中央区農人橋2-1-36
〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427

土・日・祝日を除く10:00~17:00